


Smile Line ☺
made in switzerland

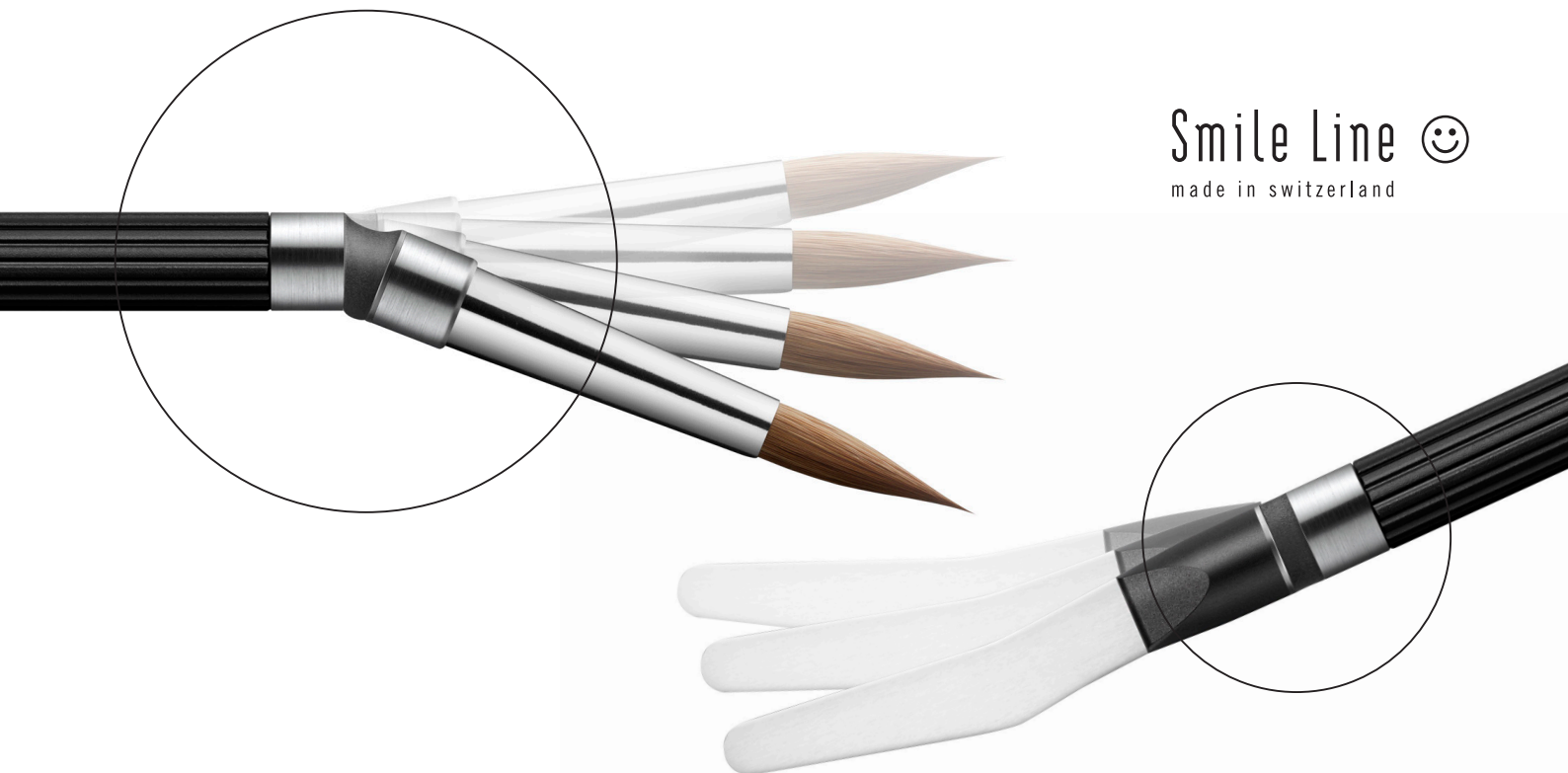

FLEXMOUNT

semplice - come ogni grande idea

«**FlexMount**» è un connettore flessibile, in caucciú naturale, studiato per assemblare manico e strumento. Questo nuovo concetto si adatta sugli strumenti Instrument by Smile Line e piú particolarmente sulle spatole ZR e sui nostri pennelli per ceramica.



„FlexMount“ con la vostra spatola ZR



Lo zirconio è un materiale high-tech che non possiede un'elasticità naturale e che è fragile per l'uso che ne facciamo. Il «**FlexMount**» agisce come un ammortizzatore e procura sicurezza e comodità durante la lavorazione della ceramica o degli stains.



„FlexMount“ con il vostro pennello per ceramica

Il «**FlexMount**» permette l'attivazione della parte anteriore del pennello con uno schiocco ('snap') delle dita e procura i seguenti vantaggi.

Effetto **1**: è necessario che la punta del pennello possieda l'umidità giusta per un montaggio della ceramica preciso e confortevole. L'azione «FlexMount» ha come risultato di "accelerare" l'umidità verso la punta del pennello.

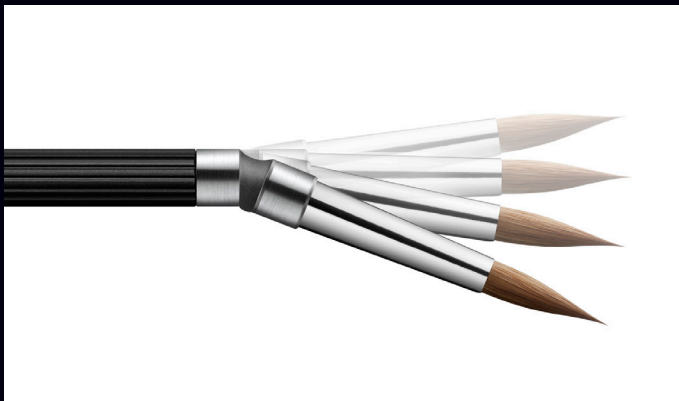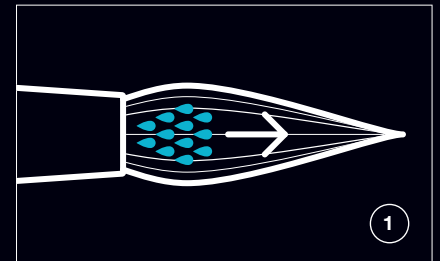

Effetto **2**: è necessario che la punta del pennello sia estremamente precisa, appuntita e stabile. Ciò è principalmente dato dalla qualità delle setole e dalla cura con cui il pennello è fabbricato. Un leggero schiocco prima di prelevare la ceramica aiuta le setole a riformare istantaneamente una bella punta.

FLEXMOUNT

Usa & consigli

Non si tratta di far "schioccare" il pennello non appena lo si estrae dal recipiente del liquido. Ciò infatti creerebbe degli spruzzi intorno alla zona di lavoro ed inoltre questo metodo non garantisce una migliore umidità nella punta del pennello. Il consiglio della Smile Line è quindi di passare prima il pennello sulla spugna della H₂O per poterne estrarre ogni eccesso di umidità possibile.

In seguito, il gesto dello schiocco si eseguirà solo durante il montaggio della ceramica, per esempio tra il prelievo di una porzione e l'altra. Questo vi permetterà al tempo stesso di ridare umidità all'estremità del vostro pennello e di ritrovare una punta assolutamente aguzza.



«FlexMount» è compatibile con i seguenti prodotti:

- Spatola ZR
- Punta di pennelli Kolinsky #8-R, #8-LT, #6 *
- Punta di pennello N.era #8 *

Dettaglio prodotti



* **N.B.:** Le punte dei pennelli per «FlexMount» costituiscono una produzione completamente nuova e di grande qualità. Oltre a ciò, la ghiera è più corta per consentire più elasticità.

FLEXMOUNT

Come e cosa devo ordinare?

Instrument by Smile Line è una linea modulabile su misura. Se possedete già un manico, vi consigliamo di ordinare un modulo completo "connettore flessibile + punta" per poter beneficiare della ghiera più corta.

Un'altra opzione è di ordinare il vostro set personale «**FlexMount – 2 instruments set**» che contiene un pennello ed una spatola in zirconio completi.

Potrete personalizzare il set scegliendo la misura di pennello ed il tipo di manico che preferite. I manici sono disponibili nell'elegante versione in fibra di carbonio o nel tradizionale alluminio anodizzato.

FIBRA DI CARBONIO

ALLUMINIO ANODIZZATO



#FL-14150-CA6 **Kolinsky #6 + ZR**



#FL-14150-6 **Kolinsky #6 + ZR**



#FL-14150-CA8K **Kolinsky #8R + ZR**



#FL-14150-8K **Kolinsky #8R + ZR**



#FL-14150-CA8N **N.era 8 + ZR**



#FL-14150-8N **N.era 8 + ZR**



FLEXMOUNT

UNA QUALITÀ SUPERIORE, UNO STILE UNICO, UN CARATTERE ESCLUSIVO... LE RAGIONI PER ACQUISTARE UN OGGETTO SMILE LINE NON MANCANO.

Smile Line 
made in switzerland