

Trubyte® Bioblend® Genios® Executive®



Soluzioni protesiche
per ogni esigenza

For better dentistry

DENTSPLY

Soluzioni protesiche per ogni esigenza

Soluzioni protesiche DENTSPLY: per **protesi di qualità eccellente**

La moderna odontoiatria cosmetica coniuga scienza odontoiatrica ed arte al fine di creare una protesi dentale personalizzata, basata su una attenta valutazione dei caratteri fisici del viso quali la dimensione, la forma ed i contorni.

La linea denti DENTSPLY è appositamente progettata per soddisfare ogni esigenza protesica: materiali all'avanguardia studiati per combinarsi alla perfezione tra loro e forme che si basano sulla ricerca DENTSPLY permettono di ottenere ottimi risultati estetici e funzionali di lunga durata.

L'assortimento DENTSPLY permette di scegliere tra diversi tipi di denti artificiali specifici per le più svariate esigenze protesiche: Trubyte® Bioblend®, Genios® ed Executive®.

L'offerta DENTSPLY si completa con linea di denti economica di classe superiore COSMO HXL, in resina PMMA (altamente reticolata) di alta qualità.



*"Denti DENTSPLY, da anni
garanzia di estetica e
funzione insieme"*
Odt. Alberto Olivieri

Scegliete la linea di denti più congeniale

Trubyte® Bioblend®

Sono i denti in ceramica più utilizzati e conosciuti al mondo. Si distinguono per la loro estetica naturale, resa possibile grazie alla particolare tecnica di stratificazione a 7 strati ed alla colorazione individuale. Facilmente personalizzabili, consentono di realizzare protesi totali o parziali "naturali", soddisfacendo anche le richieste estetiche più esigenti. Trubyte® Bioblend® è disponibile in una selezione delle forme e dei colori più utilizzati.

Genios®

Realizzati in resina di alta qualità INPEN®, consentono di ottenere ottimi risultati per la protesi rimovibile parziale e per la realizzazione di protesi rimovibili totali.

I denti anteriori e posteriori Genios® affascinano grazie all'estetica brillante e ad una perfetta forma anatomica ideata da Jürg Stuck e Michael H. Polz.

Il design a 5 zone cromatiche e l'eccellente tessitura superficiale, conferiscono a questa linea di denti per protesi una straordinaria naturalezza. Inoltre, le creste di chiusura interdentali e l'applicazione del concetto biomeccanico di occlusione stabiliscono nuovi canoni funzionali.

Executive®

Denti in resina di alta qualità INPEN®, che garantisce una eccezionale resistenza alla placca, stabilità del colore ed eccellente adesione con la resina per basi protesiche. Sono la soluzione ideale per chi sceglie di utilizzare un dente posteriore con un'armonia oclusale ed una ridotta inclinazione delle cuspidi (20° - 22°). I denti posteriori Executive® convincono grazie alla perfetta combinazione di estetica ed economicità. La particolare colorazione conferisce a questi denti un'opalescenza naturale e un'intensa vitalità. Facili da montare, favoriscono immediatamente una buona occlusione centrica: l'equilibrio oclusale è facilmente ottenibile, riducendo così al minimo gli interventi in studio e in laboratorio.



Genios® ed Executive®: estetica, funzionalità e

Denti anteriori Genios®

Genios® – il genio tra i moderni denti protesici, affascina grazie all'estetica brillante e alla sua forma perfetta. Le creste di chiusura interdentali, uniche e brevettate, consentono di evitare i cosiddetti "buchi neri" interdentali ottenendo così rapporti armoniosi con i denti adiacenti ed un aspetto naturale della papilla.

Estetica brillante

Il particolare design basato su 5 zone cromatiche e l'eccellente tessitura superficiale donano a Genios® una straordinaria naturalezza.



Denti posteriori Genios®

I denti posteriori Genios® P, cuspidati a 33°, montati in base al concetto di occlusione lingualizzata (cfr. Payne 1942), permettono di ottenere un'ottima intercuspidação sia dente a dente, che dente a due denti per un armonico ritorno in centrica ed un corretto orientamento delle forze occlusali. Molto cuspidato, è ideale per creste fortemente atrofiche. Il maggior apporto di materiale nella zona del tallone consente di ottenere modellazioni ancora più naturali. Genios® posteriore è disponibile anche nella "versione R", ideale per le protesi parziali e in condizioni di spazio ridotto: si riducono al minimo le fasi di molaggio, per una metodica di lavoro efficiente e razionale. Entrambe le versioni (normale ed R) sono disponibili anche nelle forme con premolari ingranditi (XL e XR).

Denti posteriori Executive®

Le 5 forme per i denti posteriori Executive® sono apprezzate per il loro ideale rapporto tra estetica e funzione: l'esclusivo design dona a questi denti una colorazione ed un'opalescenza naturale. Il montaggio è agevolato dalla ridotta inclinazione delle cuspidi, favorendo una buona occlusione centrica. Executive® posteriore è perfettamente abbinabile con i denti Genios® anteriori, essendo entrambi realizzati in INPEN®.

qualità


INPEN®: resina di alta qualità

La resina INPEN® (interpenetrated polymer network: reticolo polimerico interpenetrato) di alta qualità costituisce la base chimica dei denti DENTSPLY:

- Genios®
- Executive®

Costituita da copolimeri altamente reticolati e privi di riempitivi inorganici, la struttura della resina INPEN® è estremamente densa e omogenea e conferisce a questo materiale proprietà superiori:

- ottima resistenza all'abrasione
- ridotto accumulo di placca
- ottima stabilità cromatica
- altissima resistenza alla formazione di fratture
- eccellente legame con la resina per basi protesiche
- sicurezza per odontotecnico, clinico e paziente

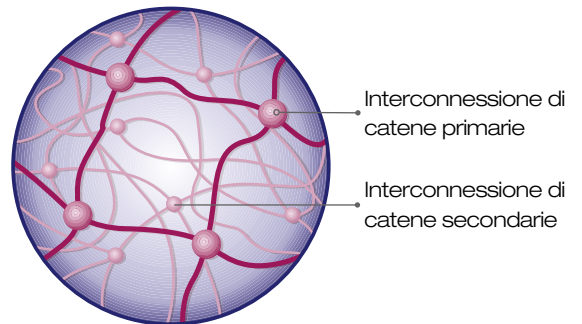

INPEN® presenta una struttura omogenea tridimensionale e interconnessione di catene molecolari primarie e secondarie.

Risultato:
elevata qualità e lunga durata dei denti protesici.



Genios®



Executive®

Trubyte® Bioblend® Denti anteriori superiori

Lunghezza del centrale senza colletto in mm	Larghezza del centrale in mm	Larghezza della sestina in mm
9,50	8,00	44,50
11,25	8,75	49,00
10,50	8,75	47,00
10,50	8,25	45,50
11,00	8,75	47,50



Trubyte® Bioblend® Denti anteriori inferiori

Lunghezza del centrale senza colletto in mm	Larghezza del centrale in mm	Larghezza della sestina in mm
8,25	4,75	32,50
9,75	5,25	36,00



Tabella di comparazione colori*

Trubyte® Bioblend®	Colorazioni V-Classic
102	A2
109	A3/ A 3,5
112	A3/ D3

* Gli abbinamenti sono puramente indicativi

Genios® Denti anteriori superiori

Disponibili nella colorazione V-Classic (A1–D4)



	Lunghezza del centrale senza colletto in mm	Larghezza del centrale in mm	Larghezza della sesta in mm
O10	10,0	7,5	44,0
O20	9,5	8,0	45,5
O30	10,5	8,0	45,5
O40	9,5	8,5	47,0
O50	9,5	8,5	47,5
O60	11,5	8,5	47,5
O70	11,5	8,5	48,5
O80	11,0	9,0	49,0
O90	14,0	9,2	52,0

Genios® Denti anteriori inferiori

Disponibili nella colorazione V-Classic (A1–D4)

	Lunghezza del centrale senza colletto in mm	Larghezza del centrale in mm	Larghezza della sesta in mm
U15	8,0	4,5	32,5
U25	9,0	5,0	36,0
U35	8,5	5,3	36,0
U45	9,5	5,5	36,5
U55	10,0	6,0	37,5
U65	11,5	6,0	37,5

Genios® Denti posteriori

Forme normali	Forme R*
	
31	-
34	34 R
36	36 R
34 XL	34 XR
36 XL	36 XR

* Le forme R corrispondono come dimensioni esattamente alle forme normali, sono solo ridotte a livello del tallone.

Genios® Denti posteriori

Disponibili nella colorazione V-Classic (A1-D4)



Larghezza delle emiarcate
posteriori in mm
Larghezza del 1. molare
in mm

29,5 9,8

31,0 8,4

32,5 10,8

34,0 9,1

34,5 11,3

36,0 9,6

Variante XL/XR

Variante con premolari ingranditi, la grandezza dei molari rimane invariata.



33,0 10,8

34,5 9,1


35,0 11,3

36,5 9,6

Forme normali/variante XL



Genios® P 34

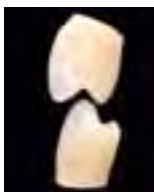

Genios® P 36XL

I premolari ingranditi facilitano la realizzazione di protesi parziali. Disponibili anche nelle forme R.

Executive® Denti posteriori

Disponibili nella colorazione V-Classic (A1-D4)



Larghezza delle emiarcate
posteriori in mm
Larghezza del 1. molare
in mm

29,0 7,8

31,0 8,2

30,0 7,8

32,0 8,0

31,0 8,5

33,0 8,8

31,0 8,5

34,0 9,0

34,0 9,2

36,0 9,6

Trubyte® Bioblend® Genios® Executive®

Tabelle di combinazione*

**Tabella di combinazione
Trubyte®/Genios®**

Trubyte® Anteriori Sup.	Trubyte® Anteriori Inf.	Genios® Anteriori Inf.	Genios® Posteriori Sup./Inf.
32E	H	U15	O31/U31
32G	---	U45/U55	O34/U34 O34R/U34R O34XL/U34XL O34XR/U34XR
45F	O	U25/U35	O34/U34 O34R/U34R O34XL/U34XL O34XR/U34XR
55F	O	U25	O31/U31
65G	O	U25/U35	O34/U34 O34R/U34R O34XL/U34XL O34XR/U34XR

**Tabella di combinazione
Genios®/Executive®**

Genios® Anteriori Sup./Inf.	Executive® Posteriori Sup./Inf.
O10/ U15, U25	U33/L33
O20/ U15, U35	U33/L33
O30/ U25, U35, U45	U33/L33
O40/ U25, U35, U45	U32/L32 U33/L33
O50/ U25, U35, U45	U33/L33 U36/L36
O60/ U35, U45	U32/L32 U33/L33
O70/ U45, U55	U33/L33 U34/L34
O80/ U45, U55	U34/L34 U36/L36
O90/ U55, U65	U36/L36

Tabella di combinazione Genios®

Genios® Anteriori		Genios® Posteriori	
Superiori	Inferiori	Superiori	Inferiori
O10	U15, U25	O31	U31
O20	U15, U35	O31	U31
O30	U25, U35, U45	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O40	U25, U35, U45	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O50	U25, U35, U45	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O60	U35, U45	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
O70	U45, U55	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
		O36, O36R, O36XL, O36XR	U36, U36R, U36XL, U36XR
O80	U45, U55	O34, O34R, O34XL, O34XR	U34, U34R, U34XL, U34XR
		O36, O36R, O36XL, O36XR	U36, U36R, U36XL, U36XR
O90	U55, U65	O36, O36R, O36XL, O36XR	U36, U36R, U36XL, U36XR

* Gli abbinamenti sono puramente indicativi.

Fascination Prosthetics

IT04053D

Prodotto da:

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
D-63457 Hanau-Wolfgang
www.degudent.de

Distribuito in Italia da:

DENTSPLY Italia S.r.l.
Piazza dell'Indipendenza, 11B
00185 Roma
Tel. +39 067264031
Fax: +39 0672640394
www.dentsply.it



For better dentistry

DENTSPLY